



ORTMANN®

DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

ДОКТОР ВАШИХ НОГ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ORTMANN – ДОКТОР ВАШИХ НОГ!

Предлагает Вам комплексные профессиональные решения проблем стопы. ORTMANN – немецкий ортопедический бренд, специализирующийся в области лечения и профилактики заболеваний стопы.

ORTMANN представляет широкий спектр моделей ортопедической обуви и стелек для взрослых и детей, а также ортопедические корректирующие приспособления. Изделия ORTMANN идеально сочетаются друг с другом и могут применяться при комплексной терапии.

ORTMANN предлагает продукцию для всех поколений: с первых шагов до пожилого возраста. ORTMANN это бренд для всей семьи.

SolaMed **REPLET**

ПОДПЯТОЧНИКИ
КОМПЕНСИРУЮЩИЕ

Арт. DP 0151

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- коррекция разной длины (укорочение) нижних конечностей 3-6 мм / 8-12 мм*;
- функциональный перенос таза;
- амортизация ударной нагрузки при заболеваниях позвоночника и суставов (использование пары без признаков укорочения нижней конечности);
- боли в области пяточной кости.

ТИП ОБУВИ:

ножные подпяточники для всех типов обуви с жестким задником.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- устраняют перекосы таза при укорочении нижней конечности;
- повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
- уменьшают нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
- амортизация пяточного отдела: уменьшают ударную нагрузку на пятку и суставы ног при ходьбе;
- улучшают общее самочувствие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

необходимость индивидуального ортезирования стопы.

ДЕТЯМ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА!

СОСТАВ:

натуральная кожа, вулканизированный латекс, клеевой фиксатор.

РАЗМЕР:

S 35-37; M 38-40; L 41-43; XL 44-46; (по размеру стопы);

* 3-6 мм; 8-12 мм; (по высоте подпяточника).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ортопедические стельки ORTMANN рекомендуется носить в повседневной и спортивной обуви. Режим ношения – ежедневно или по назначению специалиста. Длина и ширина стельки должна соответствовать размеру стопы и плотно прилегать к внутренней части обуви.

Некоторые модели стелек и полустелек могут комплектоваться отдельными клеевыми фиксаторами в индивидуальной упаковке для самостоятельного наклеивания на подошвенную сторону стелек в области пяточного амортизатора. Для максимально надежного крепления клеевого фиксатора поверхность в месте контакта должна быть совершенно сухой и чистой.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1 пара в упаковке.

ПРАВИЛА УХОДА:

- рекомендуется просушивать изделия после эксплуатации в течении 24 часов вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей;
- по мере загрязнения протирайте кожаные поверхности стелек мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым спиртовым раствором;
- по мере загрязнения протирайте текстильные поверхности стелек мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым мыльным раствором.



Обязательно просушите стельки после обработки!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

30 дней со дня продажи.

Нельзя сушить стельки в СВЧ-печи!

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

изделия ORTMANN должны храниться при комнатной температуре в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

СРОК ГОДНОСТИ:

не установлен.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

утилизация с бытовым мусором.

Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. Изделия предназначены для многократного личного использования. Соблюдения мер безопасности не требуется.



Отпускается без рецепта.

Товар является медицинским изделием.

РУ № ФСЗ 2012/12272 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.AЯ46.Д71176 (с 08.06.2015 г. по 08.06.2018 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию»

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикал Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

www.ortmann.ru